

Checkliste Probenahme und Versand

PROBE		EDTA-Probe		Haarwurzeln		Abstrich		GOcard				
Menge		1-2 ml		20-30 Haarwurzeln		2 Tupfer pro Tier		mind. 2 Tropfen mit 5mm Durchmesser				
Stabilität		gut gemischt		sicher aufgeklebt		getrocknet		trocken				
Beschriftung		Tier-ID		Tier-ID		Tier-ID		Tier-ID				
	Als Tier-ID ist jede Information geeignet, die die Probe eindeutig dem Tier zuordnet, das im Begleitschreiben benannte ist (z.B Name, Chipnummer)											
Auftrags-Info	Für alle Probenmaterialien gilt:											
	Eines	ines der folgenden Dokumente muss der Probensendung beiliegen:										
	□ Кор	☐ Kopie oder Vermerk zur Auftragsnummer des zugehörigen Online-Auftrages, oder										
	☐ Begl	☐ Begleitschreiben mit genauen Angaben zum Einsender, zum Tier sowie den auszuführenden Untersuchungen, oder										
		□ ausgefülltes Auftragsformular des Zuchtvereins, oder										
	☐ Auftragsformular Generatio											
VERSAND												
Deutschland/EU		Röhrchen dicht verschlossen		Transportkarte in der Schutzhülle		Tupferstäbchen in der Hülle, in der es ausgeliefert wurde		GOcard im Beutel, in dem sie				
		Schutzcontainer für das Röhrchen dicht verschlossen						ausgeliefert wurde				
		Plastikumschlag oder Box (KEIN Papierumschlag)		passenden Umschlag		passenden Umschlag		passenden Umschlag				
		Aufkleber ,Freigestellte veterinärmedizinische Probe'										
		☐ Absenderadresse vollständig										
		□ passendes Porto										
		☐ Umschlag ist sicher verschlossen										
Aus Drittländern	ZUSÄTZLICH In einer Tasche auf der Rückseite:											
		7-11:		Hinweis:								
		Zollinhaltserklärung					Die Angaben in dieser Checkliste sind reine Orientierungshilfen und bedingen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Korrektheit. Generatio übernimmt keinerlei Haftung aus den Folgen eventuell nicht					
		Landelsrechnung										