

Anleitung zur Probenentnahme

Wenn die Testergebnisse offiziell anerkannt werden sollen (von einer Zuchtorganisation oder zum Zwecke des Verkaufs oder der Zucht des Pferdes), muss die Probe von einem Tierarzt entnommen werden, der als Zeuge die Identität des Pferdes bestätigen kann. Dies erfordert einen Stempel und eine Unterschrift des Tierarztes sowie die Angabe des Mikrochips (bevorzugt) und/oder die Lebensnummer des Pferdes. Wenn die Testergebnisse für Ihren eigenen Gebrauch bestimmt sind, ist ein Zeuge nicht erforderlich.

Haarprobe

- 1 Die DNA des Pferdes kann aus den Haarwurzeln isoliert werden. Hierzu zupfen Sie **30 bis 40 Mähnen- oder Schweifhaare** aus und vergewissern sich, dass an jedem Haar ein **Follikel (Haarwurzel)** vorhanden ist.
Wichtig: Die Haare müssen herausgezogen werden - bitte schneiden Sie diese nicht ab (siehe Bilder)!
- 2 Die Haare sollten mit dem beigelegten Klebestreifen auf die **vorgesehene Stelle der Probenkarte** aufgeklebt werden. Achten Sie darauf, dass der Klebestreifen keinesfalls die Haarwurzeln berührt.
- 3 **Beschriften Sie die Probenkarte** entsprechend den Vorgaben.
Es können mehrere Proben in einem Umschlag verschickt werden, jede Probe muss jedoch in einem separat verschließbaren Beutel verpackt werden. Eine Kühlung der Proben ist nicht notwendig.
Wichtig: Achten Sie unbedingt darauf, dass Proben von unterschiedlichen Pferden nicht miteinander in Berührung kommen.



Der dickere Teil am Ende der Haare sind die Haarwurzeln. Diese können weiß oder schwarz sein.



Vorbereitete Probenkarte: Bitte füllen Sie die Felder mit Ihren Daten aus.

Versandhinweise

Für Proben, die von außerhalb der EU an uns gesendet werden, füllen Sie bitte das **Formular CN22** (erhältlich in jeder Poststelle) aus und kleben Sie dieses außen an den Briefumschlag. Bitte tragen Sie diese EORI Nummer in dem Feld für VAT oder EORI Nummer ein: DE2160 3853 9402 593. Bitte versenden Sie nicht per Kurier. Weitere Informationen zum Probenversand finden Sie hier: www.generatio.de/en/information/sample-shipment

Testverfahren und Ergebnisse

Die Bearbeitung der Probe beginnt unmittelbar nach Erhalt der Probe und dauert in der Regel **ca. 10 bis 15 Werktage**. Sie erhalten eine automatische Benachrichtigung, sobald die Probe bei uns eingegangen ist.

Die Bezahlung können Sie online in Ihrem Konto per Kreditkarte, PayPal, Lastschrift oder Giropay (nur in Deutschland) vornehmen, falls Sie noch nicht im Voraus bezahlt haben. Der Versand der Testergebnisse erfolgt erst nach vollständig bezahlter Rechnung. Die Ergebnisse erhalten Sie per E-Mail und werden außerdem in Ihrem Konto abrufbar sein.

Generatio GmbH Kontakt für Pferdeproben:

Paul-Ehrlich-Str. 23 support@generatio.com
72076 Tübingen +49 7071 565 448 50 (Tel)
Deutschland