

Anleitung zur Probenentnahme: Hundeproben

Bei Probeneinsendung für eine Zuchtorganisation beachten Sie bitte die jeweils geltenden Regelungen hinsichtlich der Angaben zum Tier und ob diese durch einen Zeugen (Tierarzt, ID-Beauftragter) bestätigt werden müssen. Aufwände für Änderungen/ Ergänzungen nach dem Ausstellen des Befundes verursachen zusätzliche Kosten.

Sie erhalten:

- 2 Tupferstäbchen für Schleimhautabstrich
- 1 x GOcard-SC + Alkoholtupfer + 2x Sicherheitslanzette
- Rücksendeumschlag
- Anleitung zur Probenahme

Sofern möglich entnehmen Sie bitte sowohl die beiden Tupferproben, als auch die GOcard-Probe.

Blutstropfen auf der GOcard haben den Vorteil, dass sie sichtbar sind, so dass Sie bei korrekter Beladung auch als Tierbesitzer davon ausgehen können, dass die Analyse erfolgreich sein wird.

Tupferproben haben eine höhere Ausfallrate, die vor allem durch zu kurze Trocknungszeiten entstehen.

Bitte beachten Sie: Stellt sich bei der Untersuchung heraus, dass beide Tupferproben nicht verwendet werden können, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung.

Eine Probenahme durch den Tierbesitzer oder andere, nicht-fachliche Personen erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung. Bitte suchen Sie einen Tierarzt auf, sofern Sie bei der Handhabung Ihres Tieres unsicher sind.

Wangenschleimhautabstrich

Um eine DNA-Kontamination zu vermeiden, halten Sie die zu testenden Tiere von anderen Tieren fern und füttern Sie diese mindestens zwei Stunden vor Probenentnahme nicht. Bei Welpen empfehlen wir Ihnen den Abstrich erst nach dem Ende der Sägezeit zu machen.

Beschriften Sie zuerst jedes Abstrichröhrchen außen mit folgenden Informationen:

- Kundennummer (falls bekannt)
- Name des Tieres und des Besitzers
- Datum der Probenentnahme

Wichtig: Achten Sie unbedingt darauf, dass mehrere Proben von unterschiedlichen Hunden nicht vermischt werden.

Den Wangenschleimhautabstrich führen Sie bitte wie nachfolgend beschrieben durch:

- 1 Öffnen Sie durch Drehen das Röhrchen mit dem Abstrichstäbchen und ziehen dieses heraus. Nach dem Herausziehen darf der Tupfer mit nichts in Kontakt kommen.
- 2 Führen Sie das **Stäbchen vorsichtig zwischen Wange und Zahnfleisch** des zu testenden Tieres ein.
- 3 Reiben Sie das Stäbchen für **ca. 20 Sekunden fest an der Innenseite der Wange**, um dort möglichst viele Schleimhautzellen aufzunehmen (Speichel genügt nicht, dieser enthält nur sehr wenige Zellen).
- 4 Lassen Sie das Stäbchen **mindestens 20 Minuten** trocknen.
- 5 Nach dem Trocknen stecken Sie das erste Stäbchen zurück in dessen Röhrchen und **wiederholen Sie das Prozedere mit dem zweiten Stäbchen**.

Standort Heidelberg

Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Kontakt für Hundeproben:

support@generatio.com
+49 6221 389 353 0 (Tel)
+49 6221 389 353 1 (Fax)

Entnahme von Kapillarblut am Ohr und Beladen einer „GOcard-Sc“

Bitte stellen Sie sicher, dass die Probenfläche jeder GOcard-SC ausschließlich mit dem Material des zugehörigen Tieres in Kontakt kommt. Die Karten daher bitte nicht an den Aufnahmeflächen miteinander in Berührung bringen und pro Tier immer eine individuelle GOcard-SC verwenden.

Bei der Beprobung mehrerer Tiere bitte Einmalhandschuhe tragen und diese nach jedem Tier wechseln.

Zur Vermeidung von Verletzungen können Sicherheitslanzetten zur Verfügung gestellt werden. Bei diesen ist die Klinge im Gehäuse verborgen und kann nur 1x ausgelöst und ausgefahren werden.




- 1 **Reinigen und desinfizieren** sie ein Ohr mit dem beigefügten Alkohol-tupfer.



- 4 **Warten bis ein Blutstropfen austritt.** Bei geringem Blutfluss von der Ohrwurzel in Richtung Punktionsstelle massieren.



- 2 Sicherungsstift der Lanzette durch Drehen entfernen - **auf keinen Fall den Auslöser drücken!** Die Lanzette wird sonst unbrauchbar.

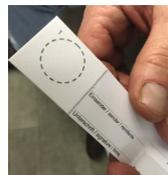

- 5 **Vorbereitete GOcard-SC kontrollieren** Die Probenfläche muss frei sein von jeglichem anderen Material.



- 3 **Lanzette aufsetzen.** Wichtig: **Erst jetzt**, bei fest angedrückter Lanzette, den Auslöser betätigen!



- 6 **Blut aufnehmen** Die angezeigte Menge erlaubt die meisten DNA-Routine-Untersuchungen.

Sie finden weitere Informationen zur Probenentnahme von Kapillarblut in diesem Video:



Versandhinweise

GOcard- und Abstrichproben zum Zwecke von DNA-Tests gelten als ‚Freigestellte Veterinärmedizinische Probe‘ und können regulär per Post verschickt werden. Für die Röhrchen verwenden Sie hierfür den beigefügten, wattierten Umschlag; eine Kühlung ist nicht erforderlich. GOcards können in Standardbriefen verschickt werden.

Für Probeneinsendungen von außerhalb der EU ist eine Zollinhaltsklärung (CN22) erforderlich. Diese erhalten Sie bei den Postannahmestellen. Wichtig: Bitte als Wert nicht mehr als 5 EUR angeben. Bei höheren Beträgen werden Zollgebühren fällig, die zu Lasten des Einsenders gehen.

Versenden Sie alles an folgende Adresse:

generatio GmbH
Blumenstraße 49
69115 Heidelberg
Deutschland

Testverfahren und Ergebnisse

Die Bearbeitung der Probe beginnt unmittelbar nach Erhalt der Probe und dauert in der Regel **ca. 10 bis 15 Werktage**. Sie erhalten eine automatische Benachrichtigung per E-Mail, sobald die Probe bei uns eingegangen ist.

Die Ergebnisse erhalten Sie **per E-Mail als elektronisch unterschriebenes PDF-Dokument**. Dieses ist anschließend auch zusätzlich in Ihrem Nutzerkonto im „Animal-Trust-Center“ in der Online-Tierakte abrufbar.

Bitte kontrollieren Sie alle zu dem Tier gemachten Angaben in der Online-Tierakte in Ihrem Nutzerkonto. Für mehr Informationen zu Probenahme und Versand besuchen Sie bitte unsere Website: www.generatio.de

Standort Heidelberg Kontakt für Hundeproben:

Blumenstraße 49 support@generatio.com
69115 Heidelberg +49 6221 389 353 0 (Tel)
Deutschland +49 6221 389 353 1 (Fax)